

# Test auf Chlamydien und Gonorrhoe (Tripper)

## Anleitung: Pooling

### Leichte Sprache

#### Wichtig:

Pooling bedeutet: Mehrere Proben kommen in **ein** Röhrchen.

In **ein** Röhrchen kommen maximal **zwei** Tupfer.

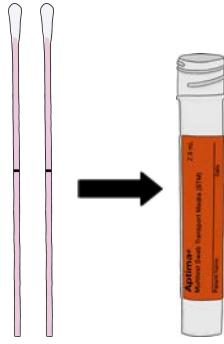
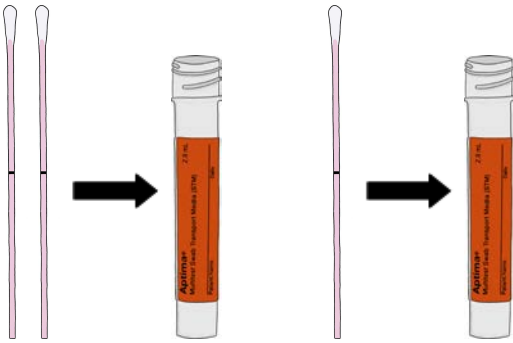
Es gibt das Pooling mit gelben Röhrchen.

Und es gibt das Pooling mit orangenen Röhrchen.

#### 1. Orangenes Röhrchen

→ Rachen-Abstrich, Vaginal-Abstrich und/ oder Rektal-Abstrich

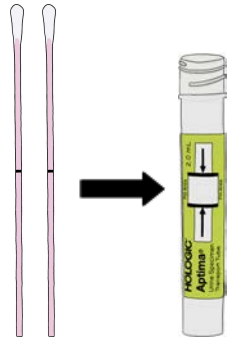
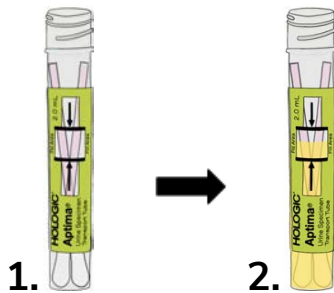

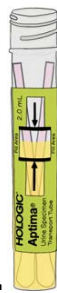
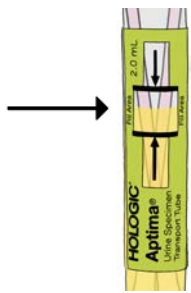
Wenn Du einen Abstrich machst, dann hast Du orangene Röhrchen.

	Bei <b>1 oder 2</b> Abstrichen hast Du <b>1</b> Röhrchen in deiner Box.
	Bei <b>3</b> Abstrichen hast Du <b>2</b> Röhrchen in deiner Box.

## 2. Gelbes Röhrchen

→ **Urin-Probe**

Wenn Du eine Urin-Probe machst, dann hast Du ein gelbes Röhrchen.

	<p>In <b>1</b> Röhrchen kommen maximal <b>2</b> Tupfer und der Urin.</p>
 <p>1.  2. </p>	<p><b>Wichtig:</b> Du musst die Abstriche <b>zuerst</b> machen. Die Tupfer kommen <b>zuerst</b> in das Röhrchen. Danach füllst Du den Urin mit der Pipette in das Röhrchen.</p>
	<p>Das Röhrchen hat ein Sicht-Fenster. Der Urin ist in der Mitte von dem Sicht-Fenster. Der Urin <b>muss</b> in dem Sicht-Fenster sein.</p>

### Achtung:

Für jeden Abstrich und die Urin-Probe gibt es eine Anleitung.

Die Anleitungen erklären Dir was Du jetzt machen musst.

Die Anleitungen erklären Dir wie Du die Proben mit der Post verschickst.